



検体の採取方法


事前に水で口をゆすいでいただき、その後は採取まで水以外の飲食物を口に含まないでください。
歯磨き粉やガムの残留物が検査を阻害する可能性があります。

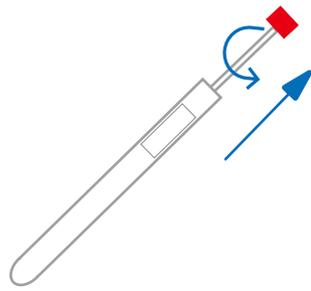


1 キャップをひねって
スワブを取り出します。
先端部分を触らないよう
に注意してください。

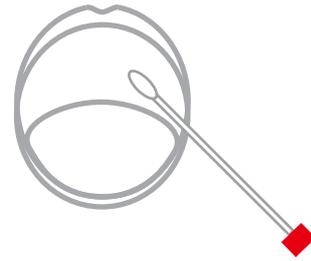

2 左右の頬の内側を
10回ずつしっかりと
ブラッシングするよう
にこすってください。

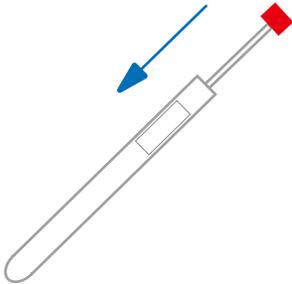


3 綿球部分を触らないよ
うに注意して、10分間
静置して乾燥させてか
らチューブに差し込ん
でください。

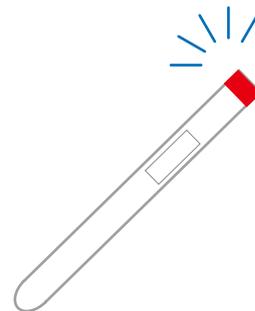


4 しっかりとキャップ
を締めてください。
すぐに発送しない
場合は冷蔵保管をし
てください。

検体の送付方法

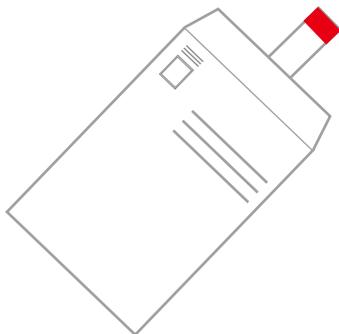

5 検体を送付用封筒に
入れ、封をしてくだ
さい。

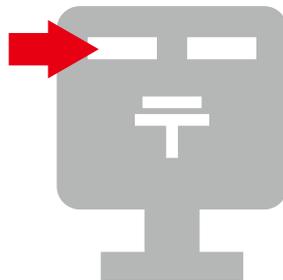

6 郵便ポストの普通郵便
差し出し口に投函
してください。



7 結果は医療機関から
連絡があります。